



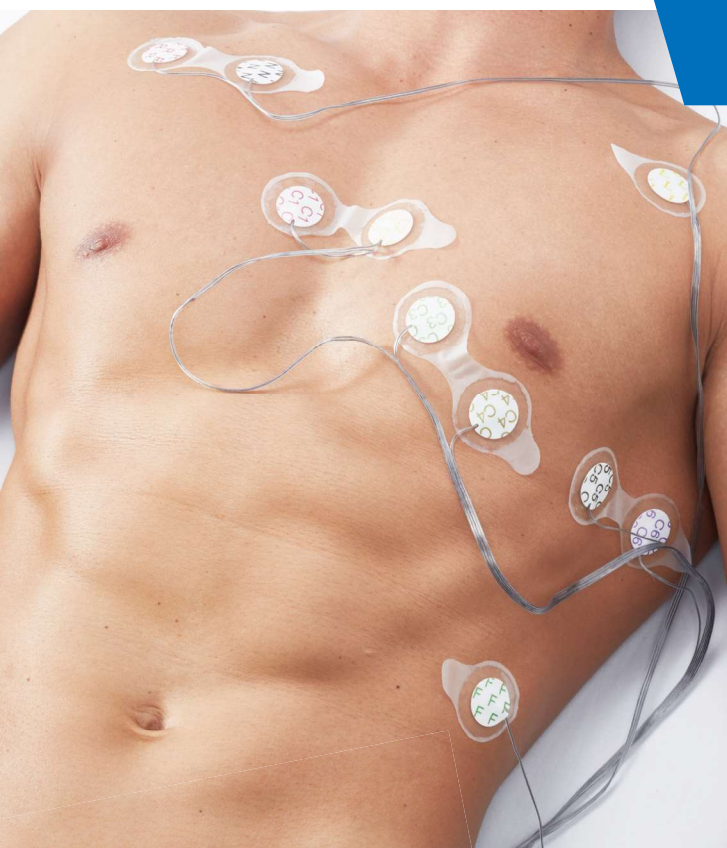

「バーメッド クララビュー®」は、新しいかたちをしたX線透過型のリード線付心電用電極です。デザインの工夫により、簡単でスピーディな検査・モニタリングに貢献します。

製品の特徴

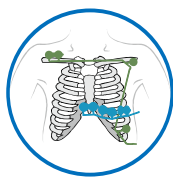

ボディポジション・マッピング®

従来は、四肢・胸部で10個のバラバラだった電極とリード線を2つのセットに集約し、身体に沿うようにリード線上に電極を配置しました。このため、医療従事者は電極をよりスムーズに貼ることができます。



絡みにくいリード線

リード線を2つのセットに集約したため、リード線同士が絡んでしまうことによるストレス軽減やノイズ低減も期待できます。



人的ミス防止の設計

電極一つひとつに異なる色で電極位置を印字しているため、貼り間違いを防ぎます。また、専用ケーブルとの接続部を2箇所に集約し、各接続部の色と形状を変えることで、誤接続を防止します。



**GOOD DESIGN
AWARD 2018**



胸部用

四肢用

CLARVUE®

バーメッド クララビュー®



種類	胸部用	四肢用
入数	30 セット	40 セット
タイプ名	50603-J-6V	50600-J-4L
クラス分類	一般医療機器	
一般の名称	単回使用心電用電極	
医療機器届出番号	26B2X10027V03001	

使用方法


1 皮膚の前処理

装着部を清潔にし、汗、水分、皮脂分を、乾いたガーゼ、アルコール綿などで十分に拭き取り、必要に応じて、除毛などを行ってください。




2 電極の用意

包装を開封し、透明な内袋から製品を取り出してリード線をほどいてください。

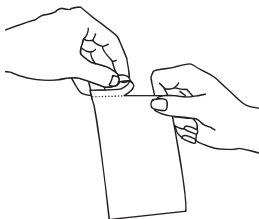


3 ライナーの剥離

タブ部分を持ってライナーから電極をゆっくり剥がしてください。

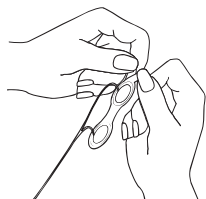


4 電極の貼付

まず四肢用の「R-N」電極を装着部に貼り付けて、続けて「L」、「F」電極を順に貼り付けてください。次に胸部用の電極を順に貼り付けてください。また、体型に合わせて電極間を切ったり、必要に応じてサージカルテープなどで固定してください。

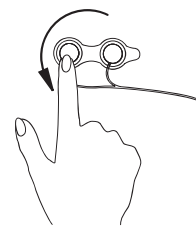


5 専用ケーブルとの接続

同じ色同士のツメと矢印マークを上向きに合わせて、奥までしっかり差し込んでください。

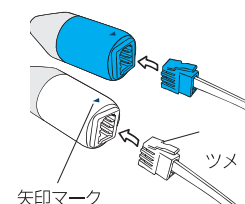


6 心電図波形の確認

波形に問題がないことを確認してください。
3点誘導でモニターする場合は、胸部セットを外してご使用ください。

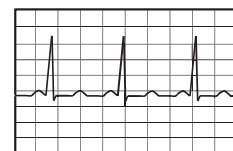

注意事項

- アース電極(N)の位置変更による心電図波形への影響はありません。
- クララビュー® には接続先のポリグラフやアブレーション装置などに合わせた専用ケーブルが必要になります。詳細は営業担当までお問い合わせください。(下図参照)
- リード線を引き裂いて使用する場合は、ゆっくりと行い、コネクタ部根元まで引き裂かないでください。
- 電極が剥がれるおそれがありますので、リード線にテンションがかからない状態でご使用ください。

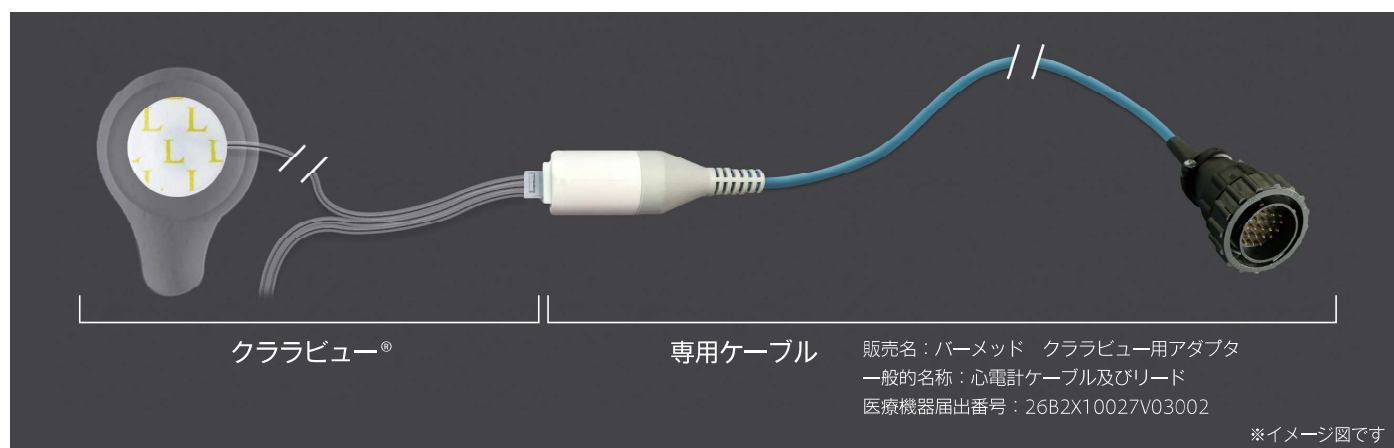

※イメージ図です

製造販売業者

NISSHA

NISSHA 株式会社 京都市中京区壬生花井町3
www.vermed.jp

ニッシャ コール
NISSHA コールセンター(医療) ☎ 0120-248-506
(8:45-17:30 ※土日、祝日および弊社休日は除く)

地域販売代理店